


# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MASCHERINA DISTRIBUITA DA VENERE RAPPRESENTANZE Via Vestina 516 - 65015  
Montesilvano(Pe) Tel.085/9142097 – Mail Venere.amministrazione@gmail.com

## ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere e seguire le istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante

**MASCHERINA DI PROTEZIONE IN TNT TIPO 1 Modello: LN MASK LAVABILE**  
DM CLASSE I NON STERILI - Tipo 1 secondo UNI EN 14683:2019

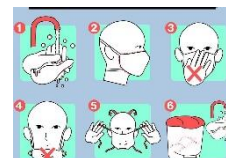

## COME INDOSSARE IL DISPOSITIVO

Prima dell'uso, verificare lo stato del dispositivo, **NON** utilizzare la mascherina nel caso in cui presenti danni (strappi, tagli, mancanza dei dispositivi di fissaggio, ecc) o che presenti sporcizia in corrispondenza del lato per la respirazione

1. Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica.
2. Indossare la mascherina mettendo gli elastici dietro alle orecchie.
3. Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto.
4. Per verificare che il dispositivo sia stato indossato correttamente, coprire la mascherina con le mani e respirare. Se l'aria scorre intorno alle narici, sistemare nuovamente la mascherina. Se si notano fughe lungo i bordi della mascherina, sistemare nuovamente il dispositivo sul volto. Ripetere l'operazione sino ad ottenere un risultato ottimale.

Se non riesce ad indossare correttamente la mascherina, evitare la zona contaminata.

## PRECAUZIONI D'UTILIZZO

1. Se non si eseguono scrupolosamente le istruzioni per l'uso e le limitazioni relative all'utilizzo della mascherina e/o non si usa la stessa durante l'intero periodo di esposizione, l'efficacia della mascherina risulterà inferiore e potrà portare a contaminazione o morte.
2. Prima dell'uso l'utilizzatore deve informarsi sull'uso corretto della mascherina in conformità con le indicazioni di sicurezza e di salute applicabili.
3. La mascherina non deve essere utilizzata in ambienti sterili e aseptici, quali sale operatorie, ambulatori, e qualsiasi ambiente dove deve essere garantita la sterilità in quanto **DISPOSITIVO NON STERILE** di TIPO I secondo la norma EN 14683:2019.
4. Se la mascherina risulta danneggiata o se si fatica a respirare, abbandonare immediatamente la zona contaminata, rimuovere e sostituire la mascherina.
5. Non alterare né modificare la mascherina.

## VITA UTILE

l'eccessiva resistenza alla respirazione indica l'ostruzione della mascherina alle particelle di polvere, la mascherina è un dispositivo individuale, la durata massima di utilizzo è per un turno di lavoro o 8 ore al giorno. In seguito la mascherina dovrà essere lavata a 40° come prescritto dal fabbricante (*il ciclo d'utilizzo del dispositivo consente massimo 10 lavaggi*).



DM CLASSE 1 TIPO I UNI EN ISO 14683:2019



Venere Rappresentanze Sas  
Via Vestina, 516 – 65015 Montesilvano (PE) TEL. 085  
9142097 [www.venererappresentanze.it](http://www.venererappresentanze.it)  
[venere.amministrazione@gmail.com](mailto:venere.amministrazione@gmail.com)

## **MASCHERINA DI PROTEZIONE IN TNT**

La Mascherina è lavabile ed è composta da TRE strati di tessuto con diverse caratteristiche, pensati per garantire durabilità nel tempo, comodità d'uso e costanza nelle prestazioni. L'uso di tessuti elastici, unito ad un'ampia superficie, conferiscono alla mascherina un'ottima vestibilità e la capacità di conformarsi al viso.

Le bande elastiche sono studiate per lasciare libere le orecchie, in modo da non interferire con occhiali o dispositivi acustici e garantire un elevato grado di comfort durante l'uso prolungato.

La Mascherina lavabile TRIPLO STRATO rientra nella categoria dei "dispositivi di protezione" definiti dall'articolo 15 del D.L. 18 del 17.03.2020 e dalla successiva Nota Interpretativa del Ministero della Salute (prot. 3572 del 18.03.2020), ed è CERTIFICATA COME:

**"MASCHERINA DI PROTEZIONE IN TNT DI TIPO I a) UNI EN 14683:2019 5,2,7 TABELLA 1"**

**E' POSSIBILE LAVARE LE MASCHERINE IN:**

**ACQUA E AMUCHINA (A MANO)\***

**ACQUA E ALCOOL DENATURATO DILUITO AL 60% (A MANO)\***

**ACQUA E IPOCLORITO DI SODIO (CANDEGGINA) DILUITA ALL'1% (A MANO)\***

**IN LAVATRICE 40° SENZA CENTRIFUGA CON DISINFETTANTI APPOSITI\***

**SE UTILIZZATE PER LAVORO CONSIGLIAMO DI UTILIZZARNE 1 OGNI 4 ORE E DI PROCEDERE ALLA SANIFICAZIONE\*\***

**SE UTILIZZATE SPORADICAMENTE PER USCIRE E FARE LA SPESA SI CONSIGLIA DI PROCEDERE ALLA SANIFICAZIONE\*\*  
OGNI VOLTA.**

**SE SI INDOSSANO I GUANTI EVITARE DI TOCCARE OGGETTI E POI SISTEMARE LA MASCHERINA IN VISO.**

\* numero di lavaggi testati prima della perdita di efficienza: 10